



# Clinitek Status+®

## hCG betjeningsvejledning

www.healthcare.siemens.dk

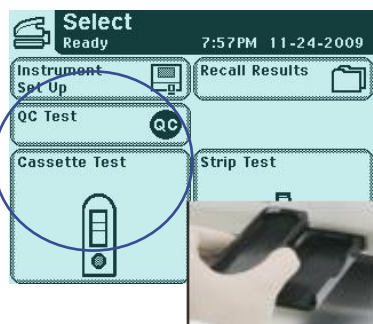

- Urinprøven skal have stuetemperatur
- Vælg **Cassette Test** på skærmen
- Scan/indtast Operator ID (regions ID) og tryk **Enter**
- Tryk på **Enter New Patient**
- Scan CPR nr. og tryk **Enter**
- Tryk **Clinitest hCG cassette**
- Tryk **Enter New lot and Expiration date**, scan lot på folien
- Tag hCG kassette og pipette ud af folien og placer kassetten i slædeindsatsen

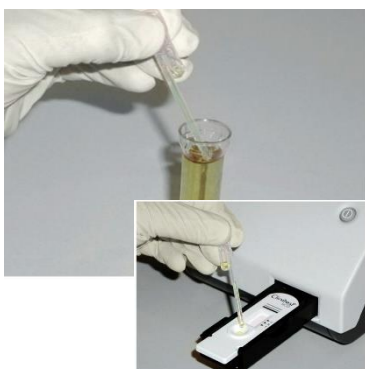

Indenfor 8 sekunder udføres følgende:

- Tryk **START**
- Opsug urin ved at trykke på den øverste pipettebold. Overskydende urin løber over i overløbskammeret
- Tøm urinen ud i den runde prøvebrønd ved at trykke på den øverste pipettebold én gang
- Overskydende urin skal blive i overløbskammeret



- Apparatet aflæser kassetten og tæller ned
- Resultatet udskrives og vises på skærmen
- Tryk **DONE** på skærmen for at komme tilbage til start
- Når testen er færdig overføres svaret automatisk til EPJ
- Kassetten kasseres og slædeindsatsen vendes evt.

### Fortolkning af resultater

Positiv: Testområdet har en koncentration af hCG  $\geq 25$  mIU/ml.

Borderline: Testområdet har en koncentration af hCG, der ligger i området 5 - 25 mIU/ml. Ny prøve udbedes indenfor 48-72 timer

Negativ: Testområdet har en koncentration af hCG  $< 5$  mIU/ml

ILM: 06484105 Clinitek Status+ Clinitest hCG (25 stk.)



For fuld dokumentation henvises til:  
Clinitek Status+ Brugermanual  
(10379691 Rev. B. 2011-06)  
Clinitest hCG indlægsseddel (06878007, 2015-06)

**SIEMENS**  
Healthineers