



1

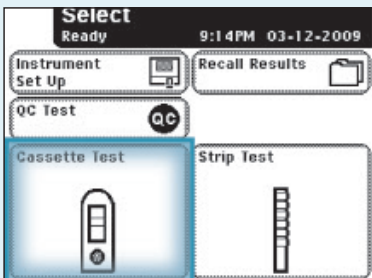


Vælg Cassette Test.

2

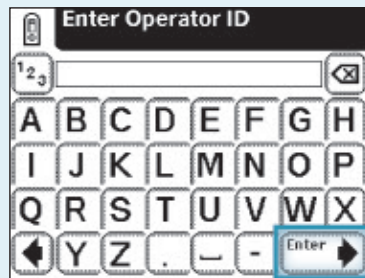


Scan/indtast operatør ID/
patient ID

3

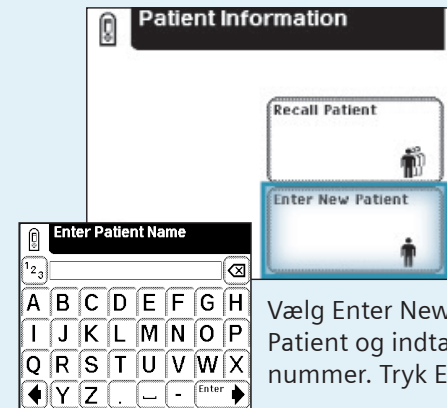

Vælg Enter New Patient og indtast CPR nummer. Tryk Enter.

4

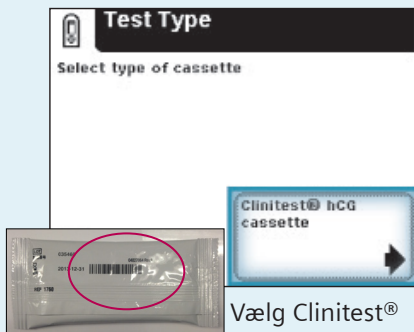


Vælg Clinitest®
hCG Cassette og
scan lotnr. på
pakningen.

5



Vend slædeindsatsen så
der er plads til at placere
en tom hCG kassette på
slæden.

6

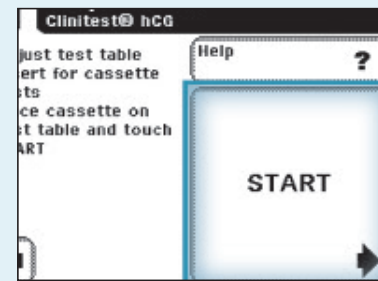

Tryk Start
Inden for 8 sekunder gøres
følgende:

7




Opsug urin i pipetten, således
at den er fuldstændig fyldt.
Overskydende urin vil løbe
over i overløbskammeret.

8



Tøm kun urinen fra pipetterøret over i
den runde prøvebrønd. Urinen fra
overløbs-kammeret må ikke bruges.
Slæden trækkes automatisk ind i
Clinitek Status apparatet og
analyseringen begynder.

9

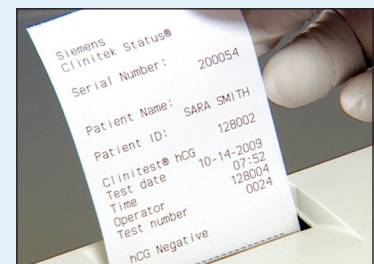

Når testen er færdig bliver
resultatet automatisk printet
ud eller overføres til EPJ.

Korrekt testprocedure med CLINITEK hCG. 13.02.2014

Clinitek Status hCG vejledning

Prøve forberedelse

- Urinen opsamles i en ren og tør beholder.
- Testen skal udføres indenfor 2 timer efter opsamling. Ellers kan urinen opbevares på køl ved 2° til 8°C i op til 72 timer.
- Kolde eller frisk ladte urinprøver skal altid have stuetemperatur (20-30°C) før analysen udføres.

Test Tips

For at undgå fejl:

- Brug kun pipetten som følger med i hCG test kassette pakningen. Pipetten dispenserer det korrekte volumen på 200µl urin.
- Tilsæt ikke urinen til brønden før der er trykket på START knappen.
- Uriner som er meget farvet eller indeholder synligt blod må ikke testes med hCG Clinitest.

Fortolkning af resultatet

- Hvis der er testet et positiv resultat på en person, hvor graviditet ikke er forventelig, gentag testen med en ny urin 24 timer senere eller resultatet bekræftes med en anden metode.
- Hvis det er et borderline resultat, gentag testen efter 48-72 timer.
- I akutte situationer anbefales det, at patienten får taget en blodprøve for at bekræfte resultatet med en kvantitativ laboratorie test.

Korrekt testprocedure med CLINITEST hCG. 13.02.2014

Clinitek Status hCG vejledning